

# Conseils pour le Programme de récupération d'objets médicaux piquants, coupants ou tranchants de l'ARPS

## Conseil n° 1

**S'assurer que la ligne de remplissage est du même côté que le losange de BIORISQUE.**

Comme la boîte de contenants d'objets piquants, coupants ou tranchants à usage médical est rectangulaire, il est facile de faire l'erreur de mettre le couvercle à l'envers. Lorsque le couvercle est bien en place, **la ligne de remplissage doit être du même côté que le losange de BIORISQUE.** Ainsi, la poignée du contenant n'est pas un obstacle pour l'utilisateur lorsqu'il y dépose des objets médicaux piquants, coupants ou tranchants à usage médical.



## Conseil n° 2

**S'assurer de bien fixer le couvercle au contenant.**

Rappel : fixer le couvercle au contenant en **poussant sur chaque coin du couvercle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.**



## Conseil n° 3

**S'assurer de refermer temporairement le contenant.**

Presser légèrement le couvercle du contenant pour le fermer jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. **La languette rectangulaire demeurera en position verticale pour que le contenant puisse facilement être rouvert.**



## Conseil n° 4

**S'assurer de refermer le contenant de façon permanente.**

Appuyer fermement sur les 2 encoches au centre du couvercle jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. **Lorsque le couvercle est fermé de façon permanente, la languette rectangulaire ne devrait plus être accessible pour ouvrir le contenant.**



Référence:  
MedicalSharpsTips/AllprovincesFR/2024/V1

Besoin d'aide? Visionnez notre vidéo pour savoir comment assembler le contenant destiné aux objets médicaux piquants, coupants ou tranchants à usage médical.



Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par courriel à :

[info@healthsteward.ca](mailto:info@healthsteward.ca)

Visitez notre site Web à : [arpsante.ca](http://arpsante.ca)



ASSOCIATION POUR LA RÉCUPÉRATION DE  
**PRODUITS SANTÉ**